



UROPOL®

Натрію хондроїтин сульфат розчин стерильний 2,0%
Для відновлення глікозаміногліканового (GAG) шару сечового міхура.

UKR Інформація для пацієнтів

УРОПОЛ

Натрію хондроїтину сульфат розчин стерильний 2,0 %

Для відновлення глікозаміногліканового (GAG) шару сечового міхура

ОПИС: Хондроїтину сульфат – відноситься до ряду кислотоутворюючих мукополісахаридів і є одним із глікозаміногліканів (GAGs). Його повторювальна дисахаридна ланка складається із глюкуронової кислоти та галактозаміну однієї сульфатної групи в β (1-3') зв'язках. Цей дисахарид полімеризується в β (1-4') зв'язках. О-сульфатування в С-4 – це хондроїтину сульфат А. О-сульфатування в С-6 – це хондроїтину сульфат С.

Внутрішня поверхня сечового міхура покрита шаром глікозаміногліканів (GAGs), який забезпечує захисний непроникний бар'єр в сечовому міхурі. Насичені поліаніонні молекули глікозаміногліканів з'єднуються з молекулами води, утворюючи при цьому молекулярний шар води між сечею і поверхнею сечового міхура, з якою глікозаміноглікани, власне, і зв'язуються. Цей шар перешкоджає приєднанню бактерій, мікрокристалів, канцерогенів та іонів. Пошкодження цього шару може призвести до зниження його захисних властивостей, включаючи подразнення стінок міхура. Хондроїтину сульфат – важливий компонент глікозаміногліканів, який може відновити його нестачу в пошкодженому глікозаміноглікановому (GAG) шарі епітелію сечового міхура.

ПОКАЗАННЯ: для відновлення глікозаміногліканового (GAG) шару сечового міхура у пацієнтів з пошкодженим епітелієм міхура або нестачею глікозаміногліканів в ньому.

ПРОТИПОКАЗАННЯ: не застосовується у пацієнтів із виявленою гіперчутливістю до компонентів розчину.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: використовувати лише для введення в сечовий міхур. Уропол не є ні контрацептивом, ні протимікробним засобом. Відкрити невикористану дозу розчину необхідно утилізувати.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: використовувати розчин лише кімнатної температури.

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ: Відомостей про побічні ефекти не надходило. Короткочасне відчуття дискомфорту можливе при введенні засобу за допомогою катетера. У деяких пацієнтів виникає відчуття дискомфорту як результат підвищеної чутливості до лубрикантів, що використовуються для полегшення введення

катетера.

ДОЗУВАННЯ: введіть 20 мл розчину в сечовий міхур після його повного випорожнення. Для досягнення оптимального ефекту Уропол слід застосовувати в повній дозі без використання будь-яких розчинників і утримувати в сечовому міхурі якомога довше (не менше 30 хв). Повторюйте введення препарату об'ємом 20 мл 1 раз на тиждень протягом 4-6 тижнів; надалі 1 раз на місяць до повного зникнення симптомів. Покращення у більшості пацієнтів настає після шеститижневого застосування розчину об'ємом 20 мл; надалі засіб застосовувався 1 раз на місяць залежно від симптоматичного стану.

УПАКОВКА: 1 мл Урополу містить: натрію хондроїтину сульфату 20 мг. Упаковка містить чотири (4) скляні флакони по 20 мл для одноразового застосування. Вміст флакона є стерильним.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати при температурі від 2 до 25 °С. Не заморожувати! Вводити препарат лише кімнатної температури. Невикористаний розчин після відкриття флакону подальшому використанню не підлягає. Рекомендації щодо маніпуляцій з упаковкою: відкривати безпосередньо перед використанням. Для того, щоб дістати флакон з упаковки, візьміться за застібку зверху, притримуючи пальцем суміжну полосу, і потягніть одну полосу, як того потребує упаковка. Для того, щоб відокремити один флакон в індивідуальній упаковці від решти, слід зробити загин в місці перфорації і декілька разів зігнути назад і вперед перед тим, як відривати.

LOT

Номер серії



Для разового використання




Використати до



Дивіться листок-вкладку з інструкцією

STERILE A

Стерильно в результаті асептичного процесу і стерильної фільтрації

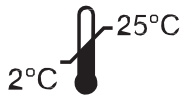

Зберігати при 2 - 25°C



Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка

Дистриб'ютори

medac

Розповсюджується через:

медак ГмбХ, Театерштрасе 6, 22880 Ведель,
Німеччина

Тел: 0800 103 0300 •

www.medac.de



Виробник

Тріб'ют Фармасьютікалс Кенеда Інк., Канада

544 Еджертон Стріт

Лондон, Онтаріо Канада N5W 3Z8

+ (519) 434 1540

www.tributepharma.com